

	<b>DOKU TİPLEME LABORATUVARI</b> <b>LENFOSİT SPESİFİK CROSS MATCH (AKIM SİTOMETRİK)</b> <b>TEST REHBERİ</b>	Belge No	DTL-TP.01
		Yayın Tarihi	12.04.2019
		Güncelleme No	02
		Güncelleme Tarihi	12.11.2024
		Sayfa No	1/1

### TEST ADI

Akım sitometrik lenfosit spesifik Cross Match (FCXM)

### NUMUNELERİN ÇALIŞMA ZAMANI

Hafta içi her gün saat 10.00'a kadar örnekler kabul edilir. Tetkik istenirken doku tipleme laboratuvarı ile iletişime geçilir.

### NUMUNE TÜRÜ

Hastadan 1 adet düz kan tüpüne (Kırmızı kapaklı) 5 ml kan alınır. Donörden 2 adet EDTA'lı tüpe (Mor kapaklı) 2'şer ml kan alınır.

### NUMUNE ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

Örnekler DTL teknik personeli eşliğinde kimlik kontrolü ve kayıt sonrasında barkodlu, uygun kan tüplerine alınır. Bu aşamada özellikle alıcı ve vericinin tüplerinin karışmamasına dikkat edilmelidir. Doku tipleme anamnez formu doldurulmalıdır. Hasta son 24 saat içerisinde hemodiyalize girmemiş olmalıdır.

### NUMUNE KABUL VE RET KRİTERLERİ

Etiketsiz, barkodsuz, yetersiz, ağzı açık, hemolizli, lipemik numuneler, antikoagulan içeren hasta serumları ve son 24 saat içinde hemodiyalize girmiş hasta örnekleri reddedilir.

### NUMUNELERİN UYGUN ŞEKİLDE ALINMASI VE TRANSFERİ

Numuneler uygun barkodlu tüplere DTL teknik personeli eşliğinde alınarak oda ısısı koşullarında transferi gerçekleştirilir.

### YÖNTEM Akım sitometrik lenfosit spesifik Cross Match (FCXM)

### TEST İSTEM UYARILARI

Kadavra dışı vericilerde bu test ile birlikte CDC cross match testi istenmelidir. Bu test isteneceği zaman laboratuvar ile iletişime geçilmelidir.

### SONUÇLARIN RAPORLANMASI

Sonuçlar Doku Tipleme Laboratuvarı Yönetmeliği'ne uygun formatta, bilgisayarda raporlanarak ıslak imzalı bir şekilde doku tipleme laboratuvarı sonuç verme sekreterliğine teslim edilir.

### SONUÇ VERME 2 iş günü sonra

LAB İLETİŞİM NO +90 232 412 2568

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Dr. İ. MEHMET ALİ ÖKTEM Dr. ÖZGEN ALPAY ÖZBEK	Birim Sorumlusu Dr. İ. MEHMET ALİ ÖKTEM