

	<b>DOKU TİPLEME LABORATUVARI</b>	Belge No	DTL-TR.04
	<b>HLA-DR, DQ MOLEKÜLER DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKTE</b>	Yayın Tarihi	09.02.2012
		Güncelleme No	03
		Güncelleme Tarihi	12.11.2024
		Sayfa No	1/1
<b>TEST REHBERİ</b>			

### TEST ADI

HLA- DR, DQ Moleküler Düşük Çözünürlükte (SSP)

### NUMUNELERİN ÇALIŞMA ZAMANI

Hafta içi hergün saat 08.30-16.00 arası örnekler kabul edilir.

### NUMUNE TÜRÜ

2 adet EDTA'lı (Mor kapaklı) tüpe 2'şer ml kan alınır.

### NUMENE ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

Sekreterlik biriminde kimlik kontrolü ile kayıt sonrasında örnekler doku tipleme anamnez formu doldurularak barkodlu uygun kan tüplerine alınır. Hasta son bir ay içerisinde kan transfüzyonu almamış olmalıdır.

### NUMUNE KABUL VE RET KRİTERLERİ

Anamnez formu ve istek formu eksik, etiketsiz, barkodsuz, miktarı yetersiz, lipemik, ağzı açık ve son bir ay içerisinde kan transfüzyonu almış örnekler reddedilir.

### NUMUNELERİN UYGUN ŞEKİLDE ALINMASI VE TRANSFERİ

Numuneler kimlik kontrolü ile anamnez formu doldurulduktan sonra uygun, barkodlu tüplere kan alınarak oda ısısı koşullarında doku tipleme birimine transferi gerçekleştirilir.

### YÖNTEM Sekans spesifik priming (SSP)

### TEST İSTEM UYARILARI

Kan transfüzyonu almış hastalardan örnek alabilmek için en az 1 ay beklenmelidir. Buna uymayan örnekler reddedilir. Doku tipleme anamnez formu mutlaka eksiksiz doldurulmalıdır.

### SONUÇLARIN RAPORLANMASI

Sonuçlar Doku Tipleme Laboratuvarı Yönetmeliği' ne uygun formatta, bilgisayarda raporlanarak ıslak imzalı bir şekilde doku tipleme laboratuvarı sonuç verme sekreterliğine teslim edilir.

### SONUÇ VERME 15 iş günü içinde

### LAB İLETİŞİM NO +90 232 412 2568

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Dr. İ. MEHMET ALİ ÖKTEM Dr. ÖZGEN ALPAY ÖZBEK	Birim Sorumlusu Dr. İ. MEHMET ALİ ÖKTEM