

TEST ADI

Kompleman bağımlı lenfosit spesifik Cross Match (CDC)

NUMUNELERİN ÇALIŞMA ZAMANI

Hafta içi hergün saat 10.00'a kadar örnekler kabul edilir. Tetkik istenirken doku tiplene laboratuvarı ile iletişime geçilir.

NUMUNE TÜRÜ

Hastadan 1 adet ACD A tüpüne (Sarı kapaklı) 9 ml, 1 adet düz kan tüpüne (Kırmızı kapaklı) 5 ml kan alınır. Donörden 1 adet ACD A tüpüne (Sarı kapaklı) 9ml kan alınır.

NUMUNE ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

Örnekler DTL teknik personeli eşliğinde kimlik kontrolü ve kayıt sonrasında uygun barkodlu kan tüplerine alınır. Bu aşamada özellikle alıcı ve vericinin ACD A tüplerinin (Sarı kapaklı) karışmamasına dikkat edilmelidir. Doku tiplene anamnez formu doldurulmalıdır. Hasta son 24 saat içerisinde hemodiyalize girmemiş olmalıdır.

NUMUNE KABUL VE RET KRİTERLERİ

Etiketsiz, barkodsuz, yetersiz, ağzı açık, hemolizli, lipemik numuneler, antikoagulan içeren hasta serumları ve son 24 saat içinde hemodiyalize girmiş hasta örnekleri reddedilir.

NUMUNELERİN UYGUN ŞEKİLDE ALINMASI VE TRANSFERİ

Numuneler uygun barkodlu tüplere DTL teknik personeli eşliğinde alınarak oda ısısı koşullarında transferi gerçekleştirilir.

YÖNTEM

Komplemana bağlı immünoisitotoksisite (CDC)

SONUÇ VERME

2 iş günü sonra

LAB İLETİŞİM NO

+90 232 412 2568

TEST İSTEM UYARILARI

Kadavra dışı vericilerde bu test ile birlikte cross match (akım sitometrik) testi istenmelidir.

Bu test isteneceği zaman laboratuvar ile iletişime geçilmelidir.